

JELLEMZŐK

A Lacri-protect® steril szemgél síkosító filmréteget képezve gyorsan szétoszlik a szem felületén javítva a könnyfilm minőségét.

- Tartósítószer-mentes.
- Aszeptikus feldolgozási technikák alkalmazásával sterilizált.
- A pipetta visszazárható, tartalmát a felbontás után 12 órán belül fel kell használni.

CÉLÁLLAT FAJOK

kutya, macska

ALKALMAZÁS

Lubrikáló és védő hatású műkönny kutyák és macskák részére.

Használati útmutató

Szemészeti alkalmazásra. Alapos kézmosást követően:

1. Törje le az egyadagos pipettát a bliszterről.
2. Nyissa ki a pipettát: csavarja meg és emelje felfelé a csúcsát.
3. A pipetta óvatos nyomásával juttasson 1-2 csepp oldatot az állat szemébe naponta 1-2 alkalommal, ha az állatorvos másképp nem rendel. A pipetta ne érjen hozzá az állat szeméhez vagy bőréhez.
4. Használat után azonnal zárja le a pipettát a lecsavart résszel.

ÖSSZETÉTEL

Karbomer 0,2%, szorbit, nátrium-klorid, nátrium-hidroxid, víz.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 3 évig. A pipetta tartalmát a felbontás után 12 órán belül fel kell használni.

TÁROLÁS

2-30°C között, fénytől védve tárolandó.

KISZERELÉS

Lacri-protect® szemgél 10x0,5ml

Lacri-protect® szemgél 110x0,5ml

Gyermekek elől elzárva tartandó! Kizárólag állategészségügyi vagy állatápolási célra!

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

2372/1/NM/2023 NÉBIH ÁTI (10dbx0,5ml)

2372/2/NM/2023 NÉBIH ÁTI (110dbx0,5ml)

GYÁRTJA

MP Labo · 45 Boulevard Marel Pagnol, 06130 Grasse, Franciaország

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA

Tridosa Kft.

9090 Pannonhalma, Hunyadi u. 13. · Regisztrációs szám: αHU07200069 · T: 20/345-0494

tridosa@tridosa.hu · www.tridosa.hu · www.facebook.com/MP Labo Magyarország

